

Gebrauchsanweisung und Herstellererklärung Kompressionsversorgungen als Sonderanfertigung nach MPG § 30 Abs. 1

Sehr geehrte/r!

Sie haben am von uns eine, für Sie individuell hergestellte, Kompressionsversorgung erhalten. Wir bestätigen hiermit, dass das Ihnen übergebene Medizinprodukt die Anforderungen des Anhangs 1 der Medizinprodukte-Verordnung erfüllt. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige **Informationen und Sicherheitshinweise**. Bitte beachten Sie, dass dieses **für Sie hergestellte Medizinprodukt** ausschließlich von **Ihnen** verwendet werden darf! Achtung! Vor erstmaliger Verwendung ist die Kompressionsversorgung gemäß Punkt 2 zu waschen!

1. Wichtige Informationen zu Ihrer Kompressionsversorgung
2. Handhabung und Pflege der Kompressionsversorgung

1. Wichtige Informationen zu Ihrer Kompressionsversorgung:

Die Kompressionstherapie ist eine Therapieform, die durch lokalen Druck auf das venöse Gefäßsystem zur Steigerung der Fließgeschwindigkeit des Blutes führt. Dieser Druck kann durch Bandagieren des betroffenen Körperteils oder durch spezielle Strümpfe erzeugt werden. Diese Form der Therapie wird bei einer Vielzahl an Krankheitsbildern eingesetzt. Hier nur ein paar:

- Venöse Insuffizienz
- Varikosis
- Lymphödem
- Thrombose
- Schwangerschaftsödeme

Die Kompressionstherapie wird auch präventiv eingesetzt um Stauungszustände im venösen System zu vermeiden. Darüber hinaus kann eine Kompressionsversorgung zur Therapie von funktionell oder ästhetisch störenden Narben, z.B. nach Verbrennungen, Operationen o.Ä. genutzt werden. Je nach ärztlicher Anordnung übt die Kompressionsversorgung einen bestimmten Druck, eingeteilt in Kompressionsklassen(I-IV), aus.

Medizinische Kompressionsversorgungen dürfen nicht auf offenen Wunden getragen werden.

In der Regel sind vom Arzt empfohlene und korrekt angepasste Kompressionsversorgungen frei von Nebenwirkungen. Bei Empfindungsstörungen wird aber empfohlen das betroffene Areal der Haut täglich auf etwaige Druckstellen o.Ä. zu prüfen. Sind solche zu erkennen, kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.

2. Handhabung und Pflege der Kompressionsversorgung:

An- und Ausziehen der Kompressionsversorgung:

- Das Anziehen erfordert je nach Versorgung Geduld und Übung. Nehmen Sie sich Zeit!
- Die erste Anprobe erfolgt immer zusammen mit unseren Mitarbeitern. Bitte fragen Sie bei etwaigen Unklarheiten gleich nach.
- Teilweise gibt es spezielle Anziehhilfen, welche Ihnen das Anziehen der Versorgung erleichtern.

Pflege- und Waschinweise:

- **Handwäsche**
- Bei **maximal 30° Celsius** waschen
- **Fein- oder Spezialwaschmittel** für niedrige Temperaturen verwenden
- Verwenden Sie **keinen Weichspüler**
- Verwenden Sie **kein Bleichmittel**
- Trocknen Sie die Wäsche **nicht im Trockner**
- **Verzichten** Sie auf **chemische Reinigung**
- **Nicht bügeln**
- **Vorsicht** bei **langen, spitzen Fingernägeln und Gegenständen**

Kundendaten:

| | |
|---------------------------|--|
| Name: | |
| Adresse: | |
| Versicherungs-Nr.: | |
| Versorgungsart: | |
| Versorgungsdatum: | |
| Verordnender Arzt: | |
| Erneuter Anspruch: | |

Ihr persönlicher Ansprechpartner:




Bei Nichterreichbarkeit wird Ihnen unter der
Telefonnummer **05 99 789 53 – 312** geholfen.

Paul Bständig GmbH

1170 Wien, Ranftlgasse 9, 3. Stock

Tel.: 05 99 789 53 - 312

Fax: 05 99 789 53 - 319

www.bstaendig.at   

kompression@bstaendig.at

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung
Und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.

© Paul Bständig GmbH 09 / 2020

Druckeinstellungen Word:

The screenshot shows the 'Drucken' (Print) dialog box in Microsoft Word. The interface is in German. On the left is a navigation pane with options like 'Speichern', 'Öffnen', and 'Drucken'. The main area is titled 'Drucken' and contains the following settings:

- Drucken:** A button with a printer icon and the text 'Drucken'.
- Exemplare:** A dropdown menu set to '1'.
- Drucker:** A dropdown menu showing 'WRKDRU20 an RANSRV01.intern.bstaendig.at' with the status 'Bereit: 1 Dokument wartet.' and a link for 'Druckereigenschaften'.
- Einstellungen:** A section with several expandable options:
 - Benutzerdefinierten Bereich drucken:** 'Bestimmte Seiten oder Abschnitte für den Druck eingeb...' with a 'Seiten:' input field containing '4,1,2,3'.
 - Beidseitiger Druck:** 'Blatt über kurze Seite drehen'.
 - Sortiert:** '1;2;3 1;2;3 1;2;3'.
 - Hochformat:** (Expanded)
 - A5:** '14,8 cm x 21 cm'.
 - Benutzerdefinierte Seitenränder:** (Expanded)
 - 2 Seiten pro Blatt:** (Expanded)

At the bottom right of the settings section is a link: [Seite einrichten](#).

Druckeinstellungen Foxit Reader: