

Paul Bständig GmbH

1170 Wien, Ranftlgasse 9, 3. Stock

Tel.: 05 99 789 53 - 313

Fax: 05 99 789 53 - 319

www.bstaendig.at   

naeherei@bstaendig.at

HG Wien. FN 74606 s



Gebrauchsanweisung und Herstellerklärung Stoffmieder

als Sonderanfertigung nach § 8 Medizinproduktegesetz 2021
und Verordnung (EU) 2017 / 745 über
Medizinprodukte

Sehr geehrte/r

Sie haben am von uns ein, für Sie individuell hergestelltes, Stoffmieder erhalten. Wir bestätigen hiermit, dass das Ihnen übergebene Medizinprodukt die Anforderungen des Anhangs 1 der Medizinprodukte-Verordnung erfüllt. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige **Informationen und Sicherheitshinweise**. Bitte beachten Sie, dass dieses **für Sie hergestellte Medizinprodukt** ausschließlich von **Ihnen** verwendet werden darf! Achtung! Vor erstmaliger Verwendung ist das Stoffmieder gemäß dieser Beschreibung zu waschen!



Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels!

- Ihr Mieder ist ein Hilfsmittel das speziell für Sie und nach Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihr Mieder vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion.
- Tragen Sie bitte immer ein Baumwollhemd oder Baumwoll-T-Shirt unter Ihrem Mieder.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz des Mieders.
- Achten Sie darauf, das Mieder NICHT VERKEHRT ODER VERDREHT anzuziehen.
- Achten Sie darauf, dass der Bauch richtig und von vorne / unten gefasst wird.
- Sollte eine Rückenpelotte eingearbeitet sein, achten Sie bitte darauf, dass diese der gewünschten Wirkungsweise / Höhe entsprechend sitzt.
- Schließen Sie die Verschlüsse gleichmäßig fest zum korrekten Sitz.
- Tragen Sie Ihr Hilfsmittel so, wie es vom Arzt gewünscht oder wie es von Ihnen benötigt wird.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Haut, achten Sie dabei auf Druckstellen und Hauerfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern. Führen Sie täglich eine Hautkontrolle durch.

- Reinigen Sie Ihre Orthese, auch innenliegende mit der Haut in Kontakt kommende Teile, mit geeignetem Reinigungsmittel regelmäßig. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.
- Schließen Sie zur Reinigung (Handwäsche 30 Grad) die Verschlüsse und entfernen Sie gegebenenfalls die Rückenpelotte. Reinigen Sie die Pelotte separat.
- Vergessen Sie nicht die Pelotte nach der Reinigung / dem Trocknen wiedereinzusetzen.
- Trocknen Sie Ihr Hilfsmittel bitte langsam. Legen Sie es nicht direkt auf die Heizungen, in die Mikrowelle, Ofen, Trockner oder direkt in die Sonne.

Wichtige Hinweise:

- Bei Passformproblemen sollte Ihr Hilfsmittel durch einen Fachmann geprüft werden.
- Bei Schäden am Mieder nutzen Sie diese auf **KEINEN FALL** ohne Rücksprache mit dem zuständigen Techniker.
- Bitte führen Sie selbst an Ihrem Hilfsmittel keine Änderungen, Umarbeiten oder Reparaturen durch!

1. Kontrolltermine:

Datum:	Bandagistin:	Maßnahme:

Kundendaten:

Name:	
Adresse:	
Versicherungs-Nr.:	
Versorgungsart:	
Versorgungsdatum:	
Verordnender Arzt:	

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Bei Nichterreichbarkeit wird Ihnen unter der
Telefonnummer **05 99 789 53 – 313** geholfen.

Paul Bständig GmbH
 1170 Wien, Ranftlgasse 9, 3. Stock
 Tel.: 05 99 789 53 - 313
 Fax: 05 99 789 53 - 319
www.bstaendig.at   